

บริการสั่งตัด "ชุดชั้นในเฉพาะบุคคล" และ "Pressure Garment"

# คู่มือการวัดขนาดสินค้า

ที่รัดขากระชับ สวมใส่หลังการรักษาแผล Burn เพื่อลดรอยกระชับแผลเป็นนูน และภาวะบวมน้ำเหลือง

ผลิตภัณฑ์ Clinical Wear สวมใส่ภายหลังการรักษาแผล Burn จากไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, โดนสารเคมีหรือประสบอุบัติเหตุ เพื่อลดกระชับรอยแผลเป็นนูน (Keloid) และภาวะบวมน้ำเหลือง เนื้อผ้ามีส่วนผสม Cotton ให้สัมผัสนุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวและช่วยระบายอากาศ, Spandex ให้แรงยึดหยุ่นกระชับ, Nylon ช่วยให้ซักทำความสะอาดง่ายและแห้งเร็ว



# บริการสั่งตัดสินค้าขนาดพิเศษเฉพาะบุคคล

Wacoal Body Clinic เราเข้าใจถึงสรีระที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่ไม่สามารถสวมใส่สินค้าสำเร็จรูปได้ เรามีบริการสั่งตัด แบบพิเศษ ให้นขนาดไซส์สินค้าเข้ากับสรีระของคุณโดยเฉพาะ เราจะวัดขนาดรูปร่างของคุณ และสร้างแพทเทิร์นใหม่ เพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสรีระ ของคุณมากที่สุด

\* ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

## ขั้นตอนการรับบริการ



คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่าน Line

@bodyclinic



วัดตัวตามคู่มือ

กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม





สร้างแพทเทิร์น



ผลิตสินค้า

# ตำแหน่งจุดวัดทั้งหมด

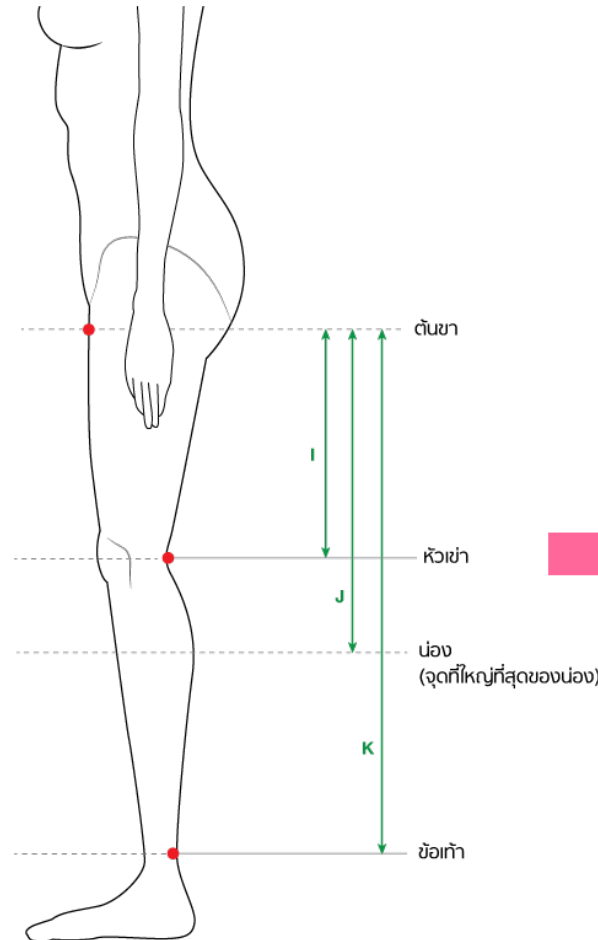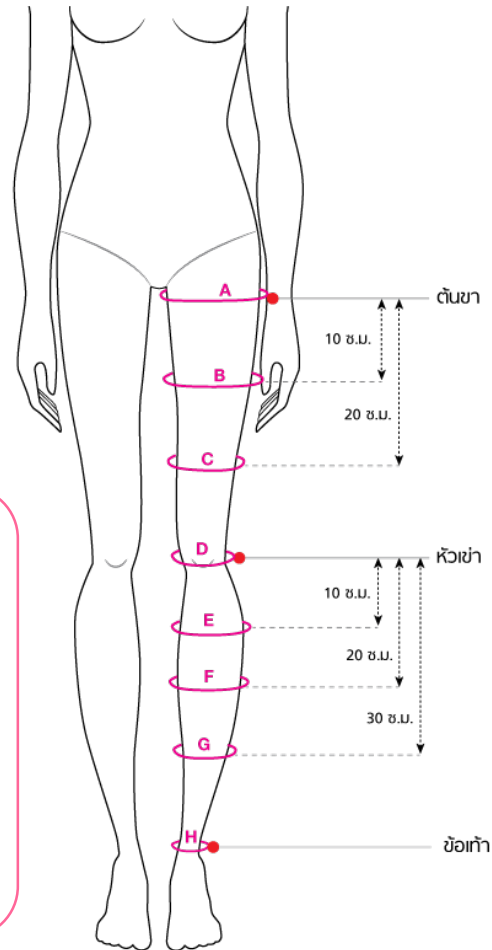

**ข้อแนะนำ**  
 วิธีการใช้สายวัด ควรวางสายวัด  
 อยู่ระดับแนวตรงแนบกับสรีระ  
 ไม่เอียง หรือ เหยงและปรับสายวัด  
 ให้แนบพอดีกับสรีระ ไม่รัดแน่น  
 หรือหลวมเกินไป



วัดตัวตามจุด **A - K** (หน่วยเป็นซ.ม.)

**BODY CLINIC**  
 Wacoal The expert in body solution

ศูนย์บริการ Wacoal Body Clinic บริษัท โคออล จำกัด (มหาชน)  
 132 ซ.ศรีนครินทร์ 7 แขวงบางลำภูล่าง เขตบางลำภูล่าง กรุงเทพมหานคร 10120  
 โทรศัพท์: 0 2839 8494, 0 2269 3199 ต่อ 418 Line: @bodyclinic

**แบบฟอร์มการสั่งตัดสินค้า WACOAL BODY CLINIC**

โรงพยาบาล..... จังหวัด.....  
 แพทย์  พยาบาล  ผู้ดูแล .....

**ข้อมูลส่วนบุคคล / ที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า**  
 ชื่อ..... นามสกุล..... เพศ  ชาย  หญิง อายุ.....ปี  
 บ้านเลขที่..... หมู่..... ซอย..... อาคาร/หมู่บ้าน.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ / มือถือ .....

**ข้อมูลการสั่งตัดสินค้า**  
 (สั่งตัด 3 ตัว)  สีสันสินค้า.....  สี NN (เนื้อ) จำนวน.....ตัว  
 สี BL (ดำ) จำนวน.....ตัว

**รูปแบบสินค้า**

<input type="checkbox"/> กางเกงกระชับ	<input type="checkbox"/> แฟ้นกระชับคอ
<input type="checkbox"/> กางเกงรัด	<input type="checkbox"/> เสื้อกระชับ
<input type="checkbox"/> กางเกงรัด	<input type="checkbox"/> หน้ากากกระชับ
<input type="checkbox"/> ที่รัดแขน	<input type="checkbox"/> อื่นๆระบุ.....

โปรดอ่านและทำความเข้าใจ "คู่มือการสั่งตัดสินค้า" จากนั้น วัดตัวตามจุดที่กำหนด และกรอก  
 ข้อมูลตัวเลขจุดวัดในตำแหน่งต่าง ๆ ลงแบบฟอร์ม


A .....ซ.ม.	K .....ซ.ม.	U .....ซ.ม.	AE .....ซ.ม.	AO .....ซ.ม.
B .....ซ.ม.	L .....ซ.ม.	V .....ซ.ม.	AF .....ซ.ม.	AP .....ซ.ม.
C .....ซ.ม.	M .....ซ.ม.	W .....ซ.ม.	AG .....ซ.ม.	AQ .....ซ.ม.
D .....ซ.ม.	N .....ซ.ม.	X .....ซ.ม.	AH .....ซ.ม.	AR .....ซ.ม.
E .....ซ.ม.	O .....ซ.ม.	Y .....ซ.ม.	AI .....ซ.ม.	AS .....ซ.ม.
F .....ซ.ม.	P .....ซ.ม.	Z .....ซ.ม.	AJ .....ซ.ม.	AT .....ซ.ม.
G .....ซ.ม.	Q .....ซ.ม.	AA .....ซ.ม.	AK .....ซ.ม.	AU .....ซ.ม.
H .....ซ.ม.	R .....ซ.ม.	AB .....ซ.ม.	AL .....ซ.ม.	AV .....ซ.ม.
I .....ซ.ม.	S .....ซ.ม.	AC .....ซ.ม.	AM .....ซ.ม.	AW .....ซ.ม.
J .....ซ.ม.	T .....ซ.ม.	AD .....ซ.ม.	AN .....ซ.ม.	AX .....ซ.ม.

สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่..... ผู้รับเรื่อง..... หมายเลข.....

กรอกข้อมูลจุดวัดทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม  
 เลือกเมนู File และเลือก Save เพื่อบันทึกข้อมูล

# จุดวัดตำแหน่ง


A

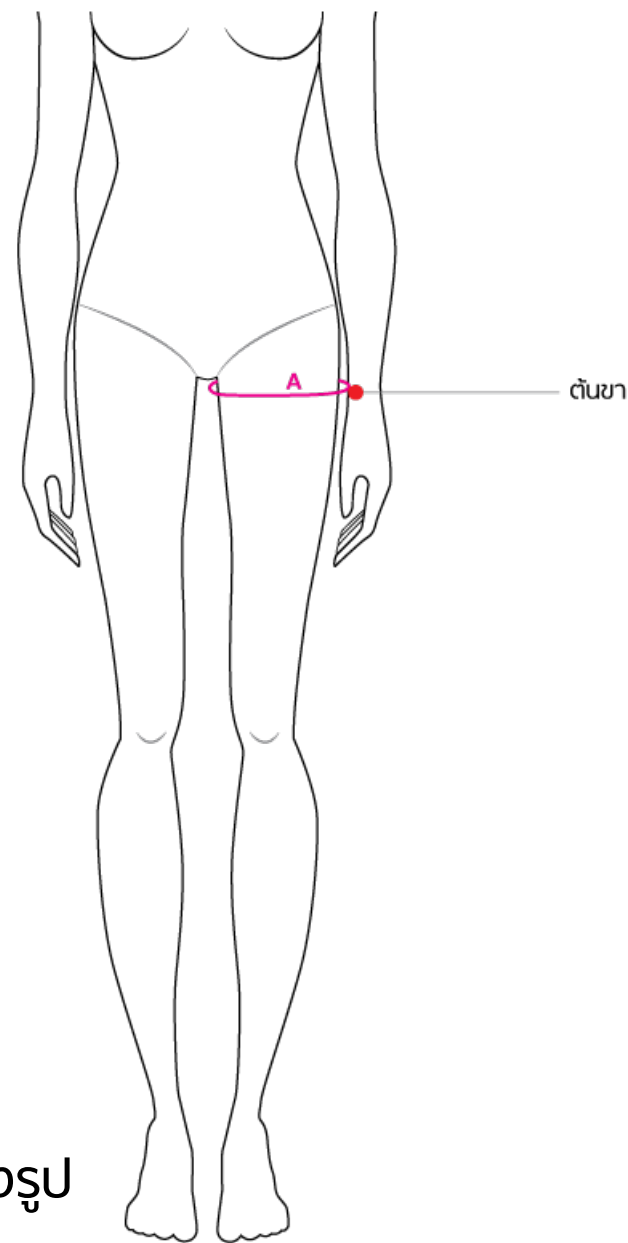

ต้นขา วัดรอบต้นขา ให้สายวัดอยู่ชิดเป้าด้านใน ดังรูป


# จุดวัดตำแหน่ง

B

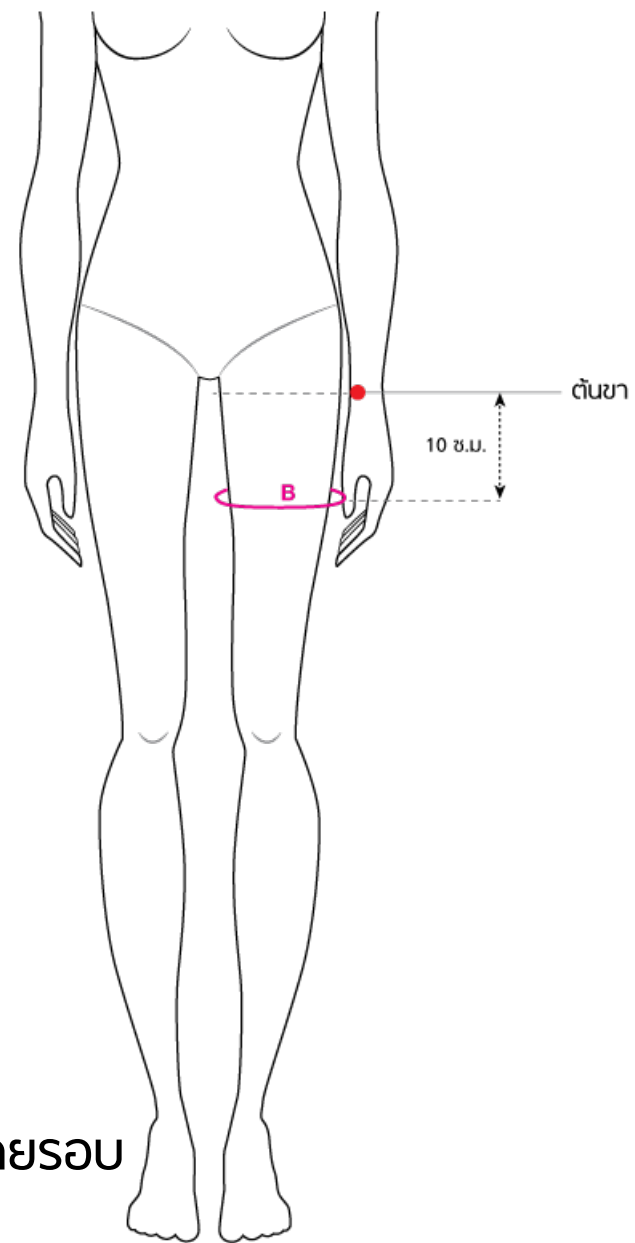

ต้นขา ระยะห่างจากต้นขาลงมา 10 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

# จุดวัดตำแหน่ง

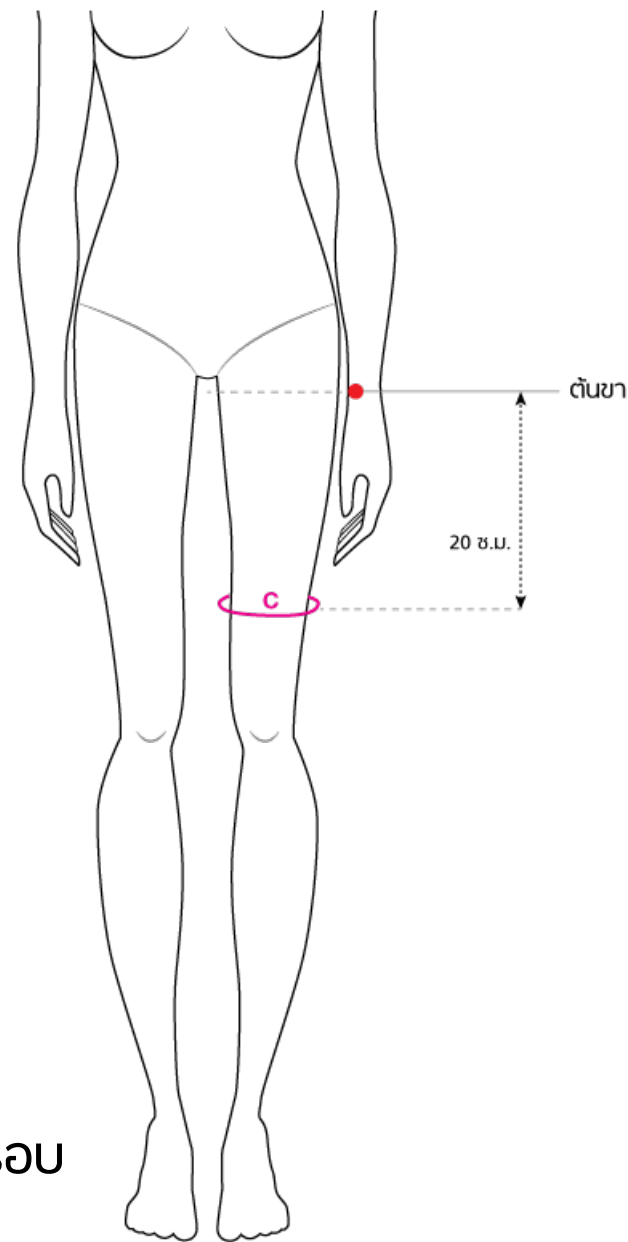


ต้นขา ระยะห่างจากต้นขาลงมา 20 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

# จุดวัดตำแหน่ง

D




เข่า วัดรอบเข่าผ่านข้อพับขา

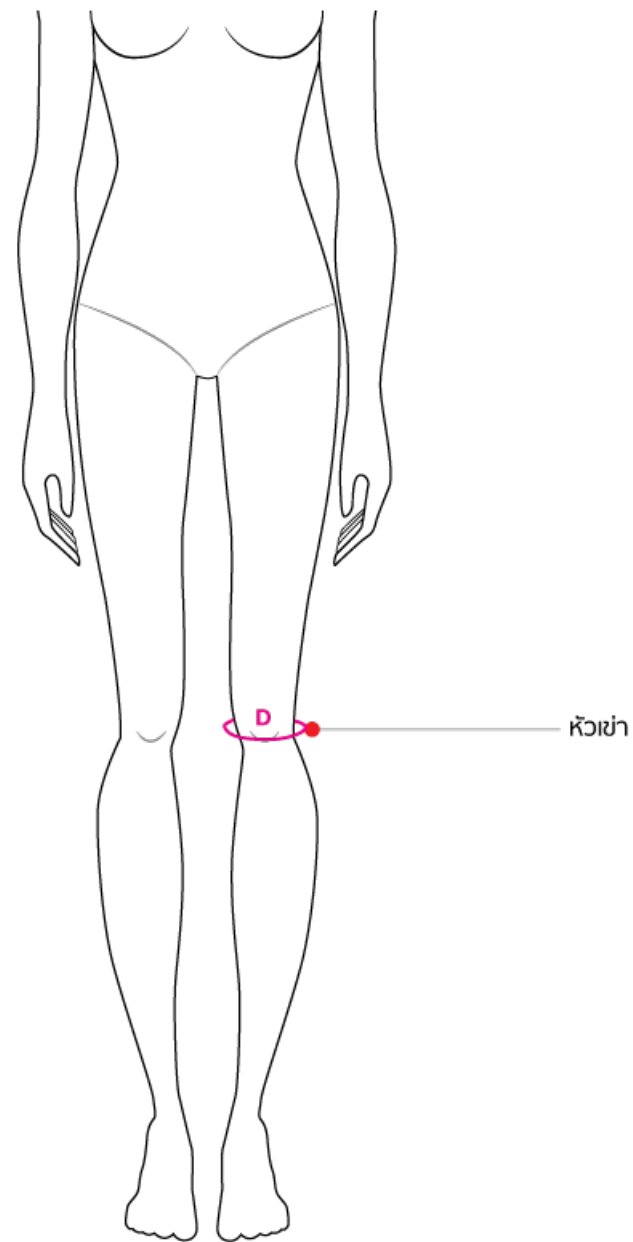



# จุดวัดตำแหน่ง

E

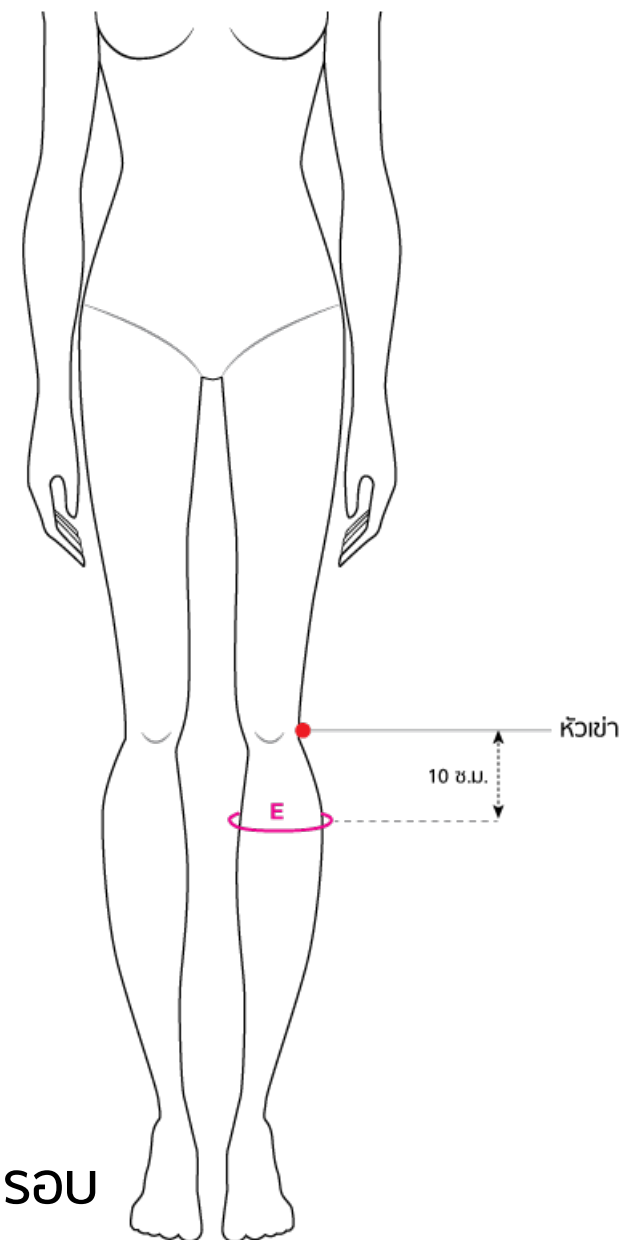


น่องส่วนที่1 ระยะห่างจากเข่าลงมา 10 ซม. แล้ววัดโดยรอบ



# จุดวัดตำแหน่ง


F

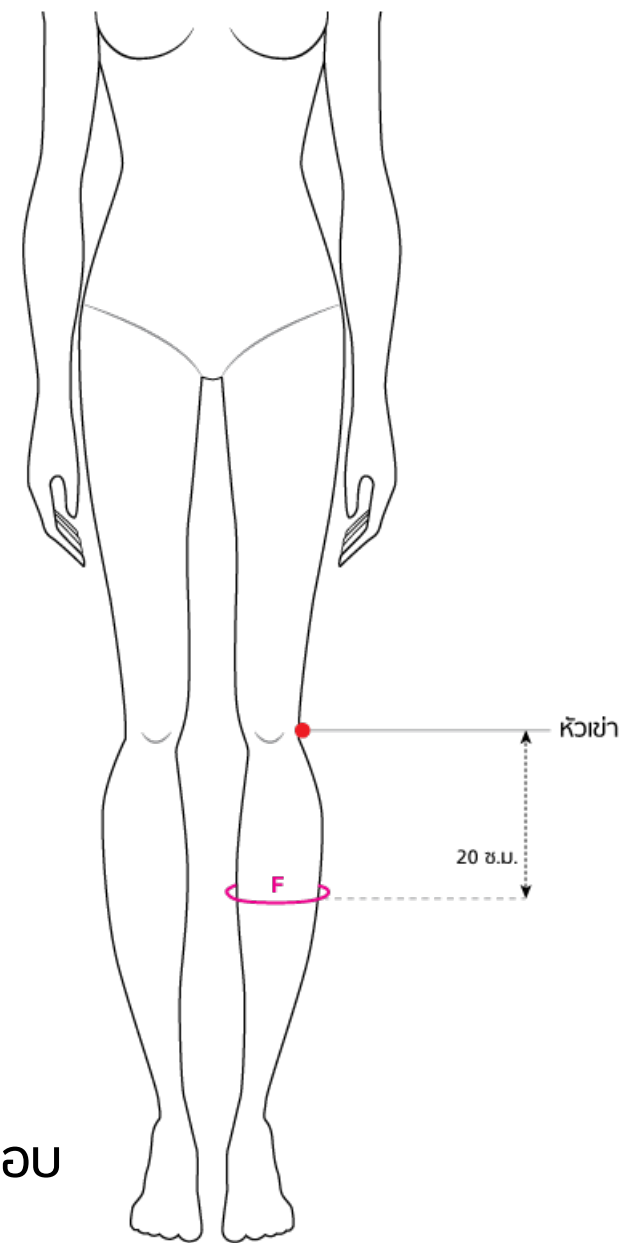

น่อง ระยะห่างจากเข่าลงมา 20 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

# จุดวัดตำแหน่ง

G

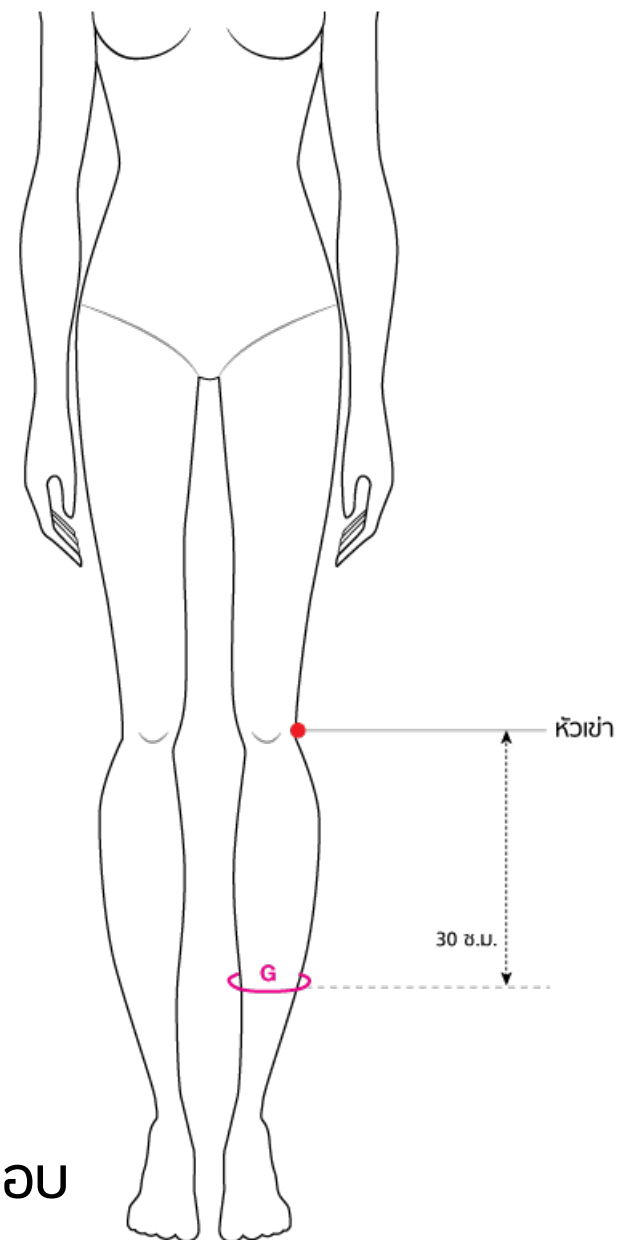

น่อง ระยะห่างจากเข่าลงมา 30 ซม. แล้ววัดโดยรอบ


# จุดวัดตำแหน่ง

H



ข้อเท้า

ข้อเท้า วัดรอบข้อเท้า

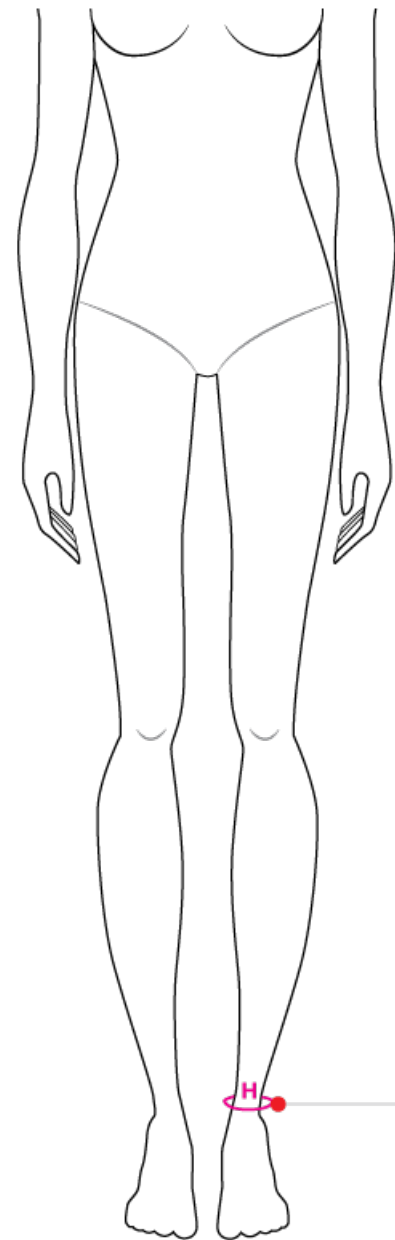

ข้อเท้า

# จุดวัดตำแหน่ง I,J,K

ยึดสายวัด ไว้ที่ตำแหน่งต้นขา จรดพื้น  
โดยไม่ต้องขยับสายวัด แล้วอ่านค่าตัวเลขที่ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

- I : อ่านค่าจากต้นขาถึงเข่า
- J : อ่านค่าจากต้นขาถึงน่อง (จุดที่ใหญ่ที่สุดของน่อง)
- K : อ่านค่าจากต้นขาถึงข้อเท้า

