


บริการสั่งตัด "ชุดชั้นในเฉพาะบุคคล" และ "Pressure Garment"

คู่มือการวัดขนาดสินค้า

เสื้อกระชับ สวมใส่หลังการรักษาแผล Burn เพื่อลดรอยกระชับแผลเป็นนูน

ผลิตภัณฑ์ Clinical Wear สวมใส่ภายหลังการรักษาแผล Burn จากไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, โดนสารเคมีหรือประสบอุบัติเหตุ เพื่อลดกระชับ รอยแผลเป็นนูน (Keloid) เนื้อผ้ามีส่วนผสม Cotton ให้สัมผัสนุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวและช่วยระบายอากาศ, Spandex ให้แรงยึดหยุ่นกระชับ, Nylon ช่วยให้ซักทำความสะอาดง่ายและแห้งเร็ว

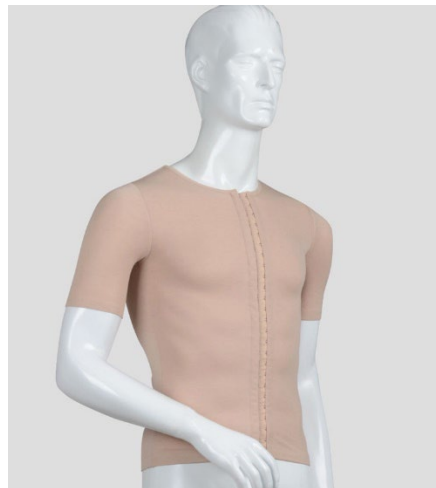

บริการสั่งตัดสินค้าขนาดพิเศษเฉพาะบุคคล

Wacoal Body Clinic เราเข้าใจถึงสรีระที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่ไม่สามารถสวมใส่สินค้าสำเร็จรูปได้ เรามีบริการสั่งตัด แบบพิเศษ ใช้นาฬิกาไซส์สินค้าเข้ากับสรีระของคุณโดยเฉพาะ เราจะวัดขนาดรูปร่างของคุณ และสร้างแพทเทิร์นใหม่ เพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสรีระ ของคุณมากที่สุด

* ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

ขั้นตอนการรับบริการ



คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่าน Line

@bodyclinic



วัดตัวตามคู่มือ

กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม






สร้างแพทเทิร์น



ผลิตสินค้า

ตำแหน่งจุดวัดทั้งหมด

ข้อแนะนำ วิธีการใช้สายวัด ควรวางสายวัด อยู่ระดับแนวตรงแนบกับสรีระ ไม่เอียงหรือเฉียง และ ปรับสายวัดให้แนบพอดีกับสรีระ ไม่รัดแน่น หรือหลวมเกินไป

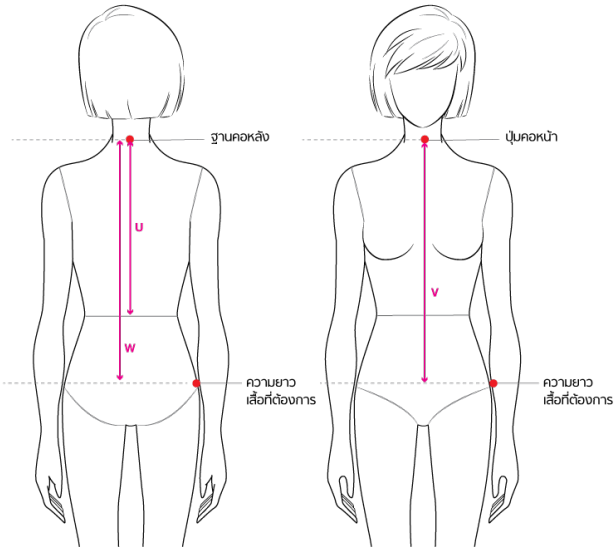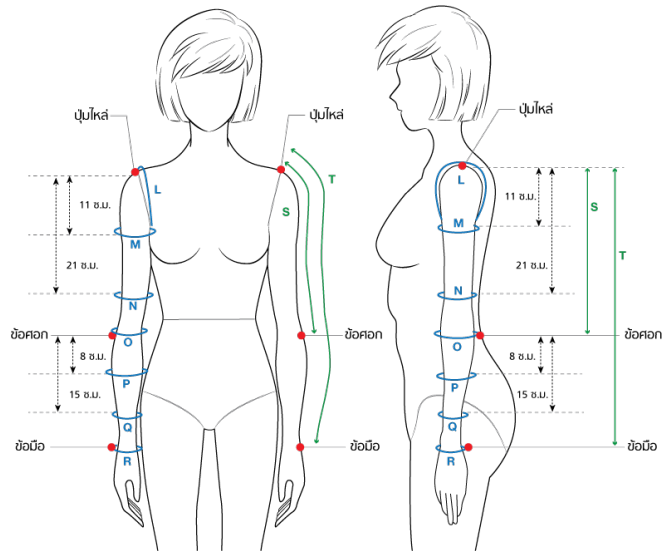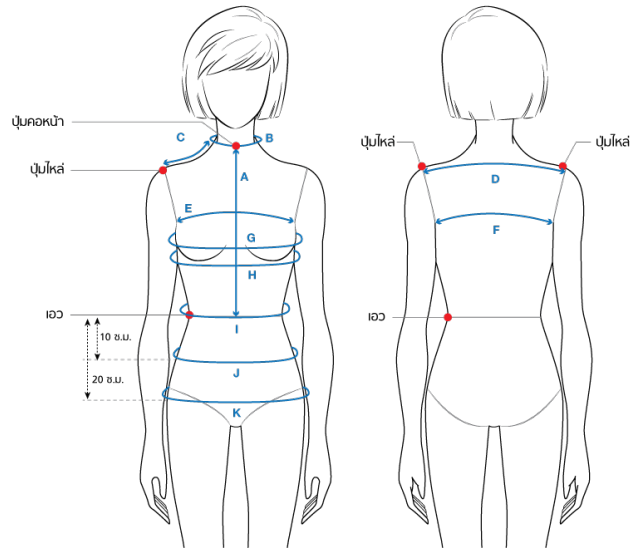

วัดตัวตามจุด **A – W** (หน่วยเป็น ซม.)

BODY CLINIC
Wacoal The expert in body solution

ศูนย์บริการ Wacoal Body Clinic บริษัท โยคอดี จำกัด (มหาชน)
132 ซ.ศรีนครินทร์ 7 แขวงบางค้อ เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2693 9494, 0 2693 3109 ต่อ 418 Line: @bodyclinic

แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า WACOAL BODY CLINIC

โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแล

ข้อมูลส่วนบุคคล / ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

ชื่อ..... นามสกุล..... เพศ ชาย หญิง อายุ.....ปี

บ้านเลขที่..... หมู่..... ซอย..... อาคาร/หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ / มือถือ

ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า (ส่งสินค้า 3 ตัว) สี NN (เนื้อ) จำนวน.....ตัว สี BL (ดำ) จำนวน.....ตัว

- รูปแบบสินค้า
- ทางเทงกระชับ
 - ฟันกระชับคอ
 - กุดเท้ากระชับ
 - เสือกระชับ
 - กุดมือกระชับ
 - หน้ากากระชับ
 - ที่รัดแขน
 - อื่นๆระบุ.....

โปรดอ่านและทำความเข้าใจ "คู่มือการสั่งซื้อสินค้า" จากนั้น วัดตัวตามจุดที่กำหนด และกรอก ข้อมูลตัวเลขจุดวัดในตำแหน่งต่าง ๆ ลงแบบฟอร์ม

A ซม.	K ซม.	U ซม.	AE ซม.	AO ซม.
B ซม.	L ซม.	V ซม.	AF ซม.	AP ซม.
C ซม.	M ซม.	W ซม.	AG ซม.	AQ ซม.
D ซม.	N ซม.	X ซม.	AH ซม.	AR ซม.
E ซม.	O ซม.	Y ซม.	AI ซม.	AS ซม.
F ซม.	P ซม.	Z ซม.	AJ ซม.	AT ซม.
G ซม.	Q ซม.	AA ซม.	AK ซม.	AU ซม.
H ซม.	R ซม.	AB ซม.	AL ซม.	AV ซม.
I ซม.	S ซม.	AC ซม.	AM ซม.	AW ซม.
J ซม.	T ซม.	AD ซม.	AN ซม.	AX ซม.

สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่..... ผู้รับเรื่อง..... หมายเลข.....


กรอกข้อมูลจุดวัดทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม เลือกเมนู File และเลือก Save เพื่อบันทึกข้อมูล

จุดวัดตำแหน่ง

A




นำเชือกมาผูกรอบเอวเพื่อกำหนด
ตำแหน่ง รอบเอว

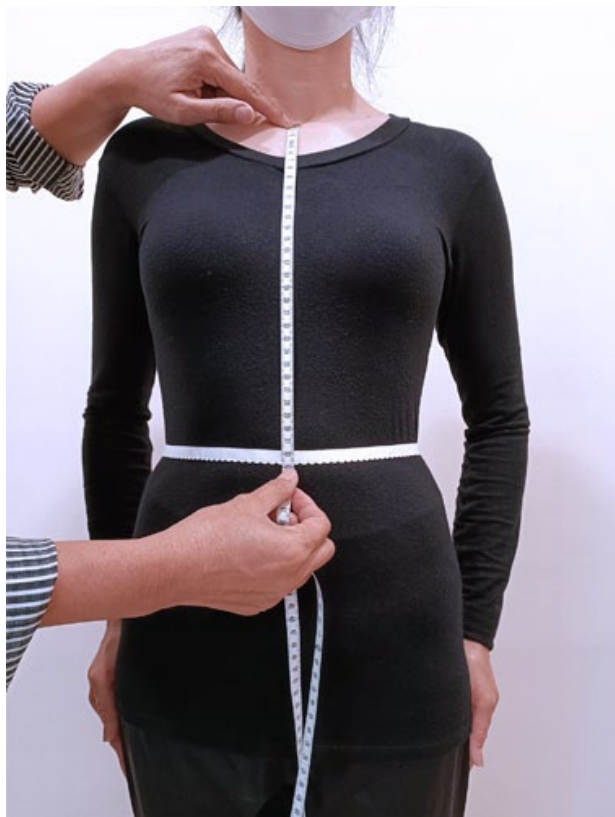

ยาวหน้า วัดจากปุ่มคอหน้าถึงเอว

ปุ่มคอหน้า

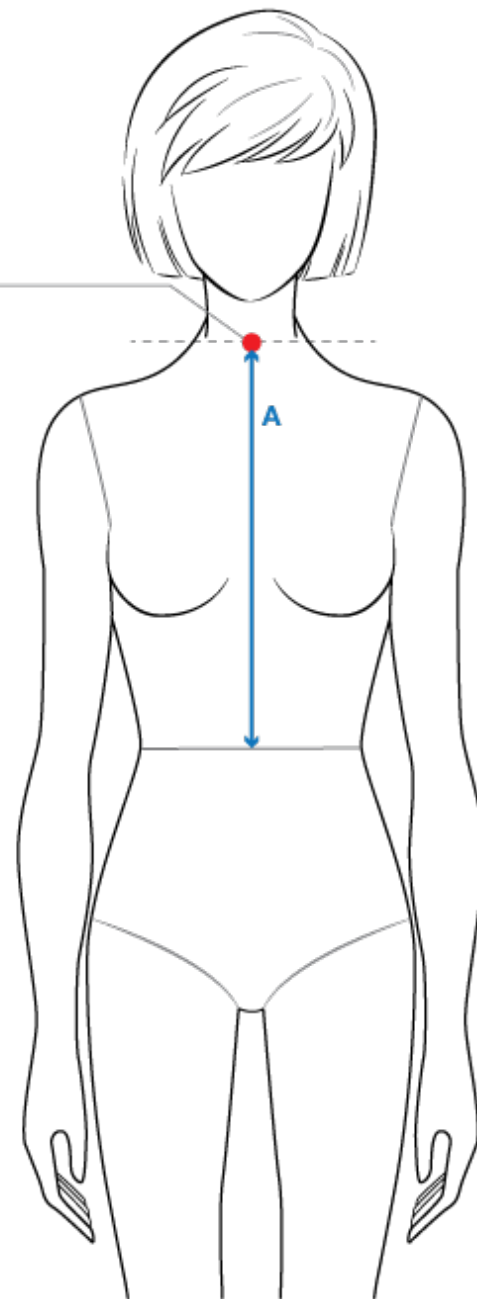


จุดวัดตำแหน่ง

B



ปุ่มคอหน้า

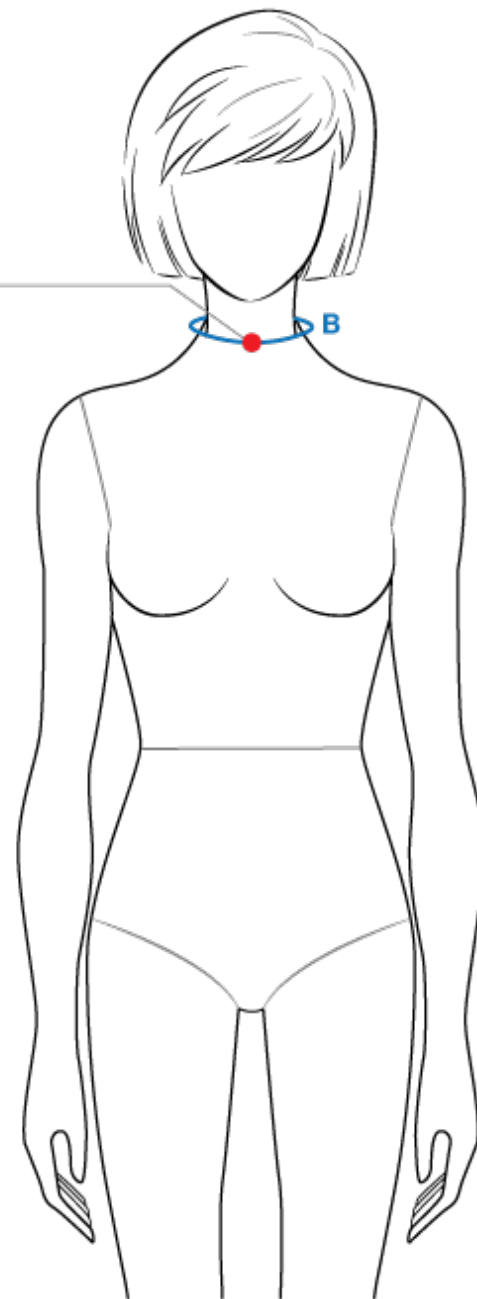


รอบคอ วัดรอบฐานคอผ่านปุ่มคอหน้า

จุดวัดตำแหน่ง





ปุ่มไหล่

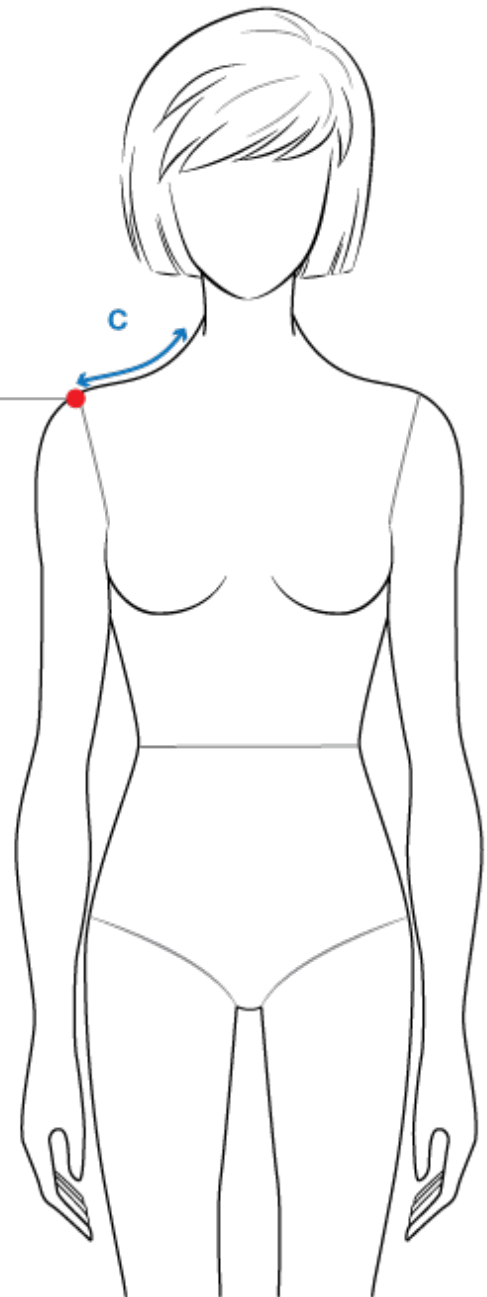

ไหล่กว้าง วัดจากข้างคอถึงปุ่มไหล่

จุดวัดตำแหน่ง


D

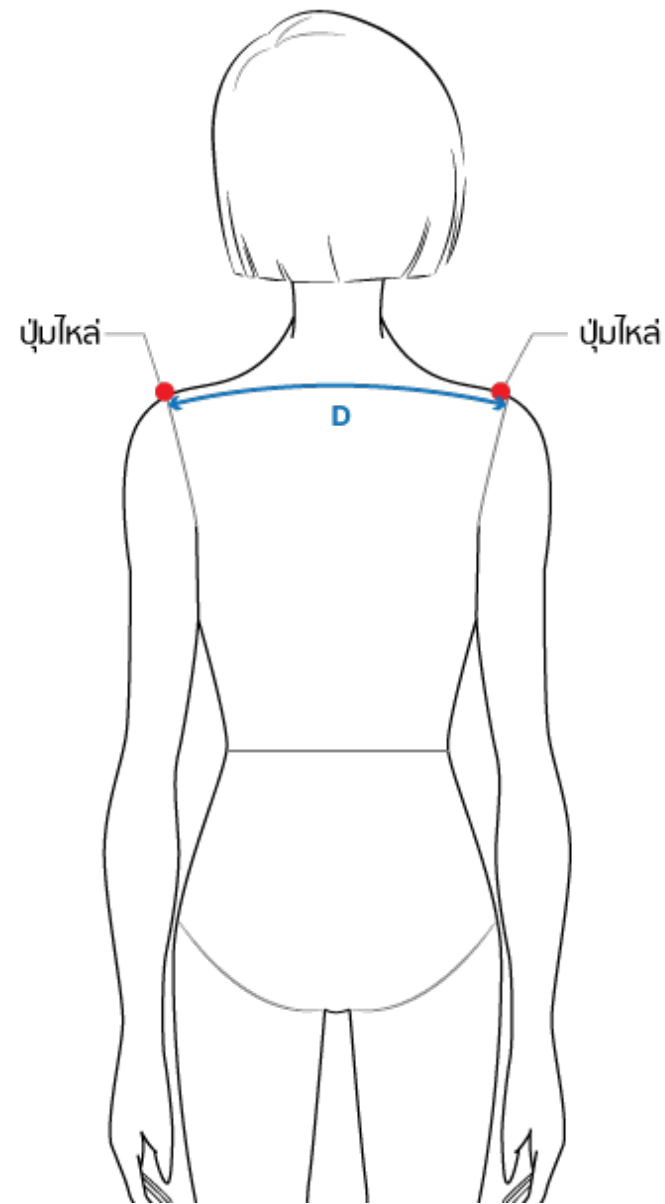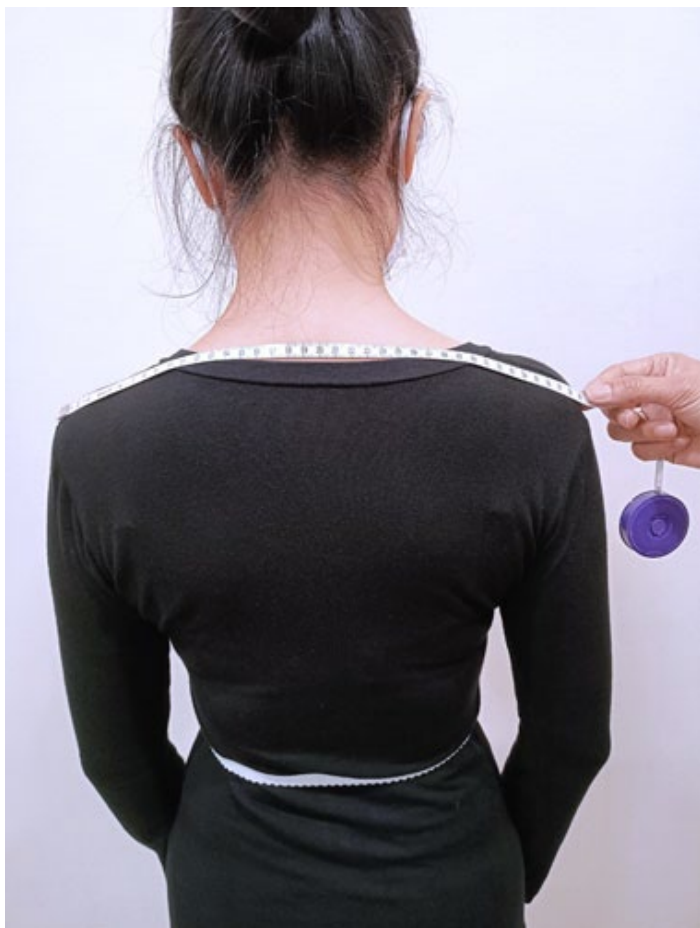

ไหล่รวม วัดจากปุ่มไหล่ด้านหนึ่ง ไปยัง อีกด้านหนึ่งโดย วัดผ่านฐานคอหลัง

จุดวัดตำแหน่ง


E

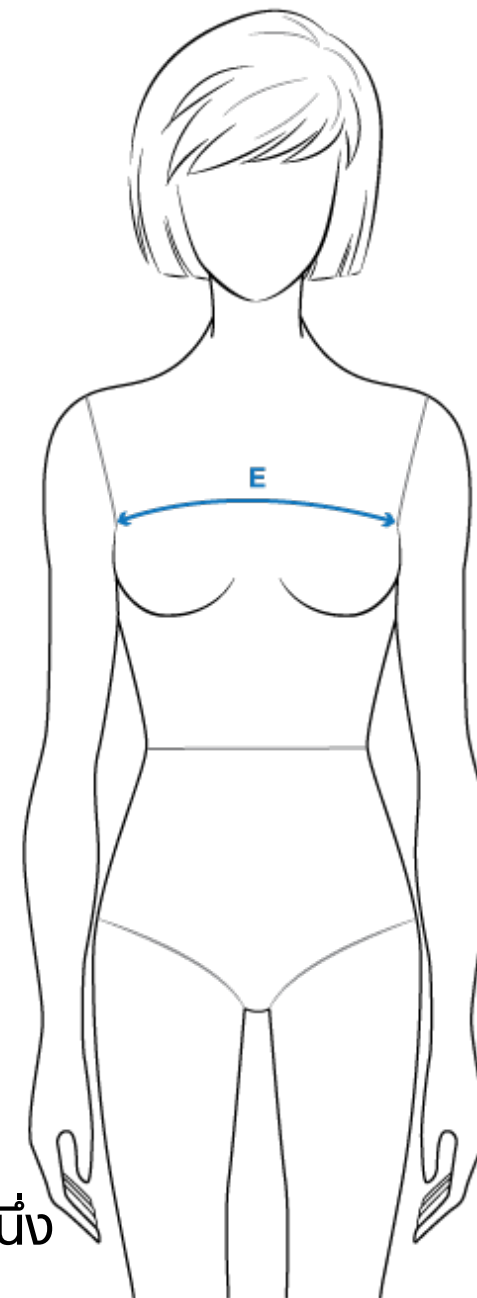

บ่าหน้า วัดจากรอยพับแขน ด้านหน้า จากด้านหนึ่ง ถึง อีกด้านหนึ่ง

จุดวัดตำแหน่ง


F

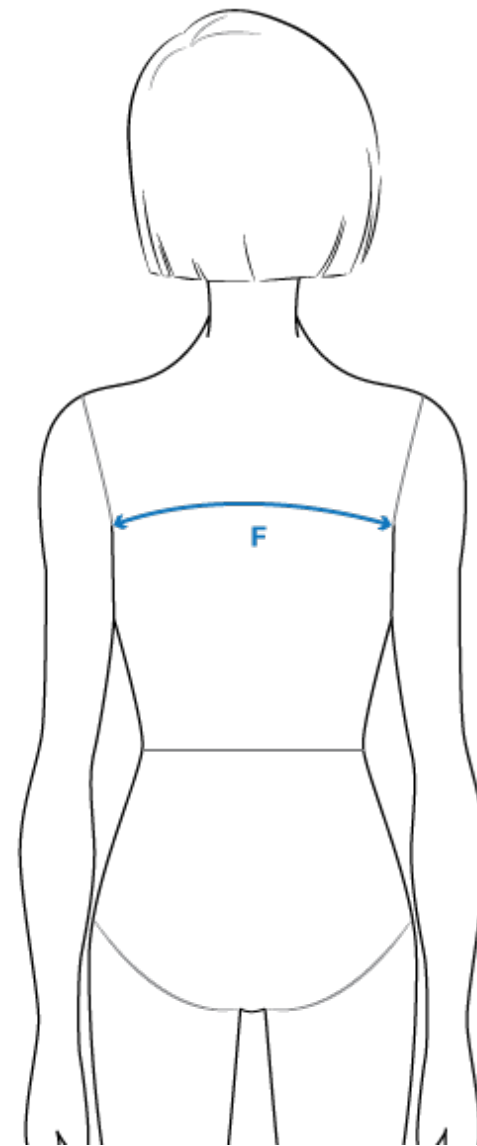

บ่าหลัง วัดจากรอยพับแขนด้านหลัง จากด้านหนึ่งถึงอีก ด้านหนึ่ง

จุดวัดตำแหน่ง


G

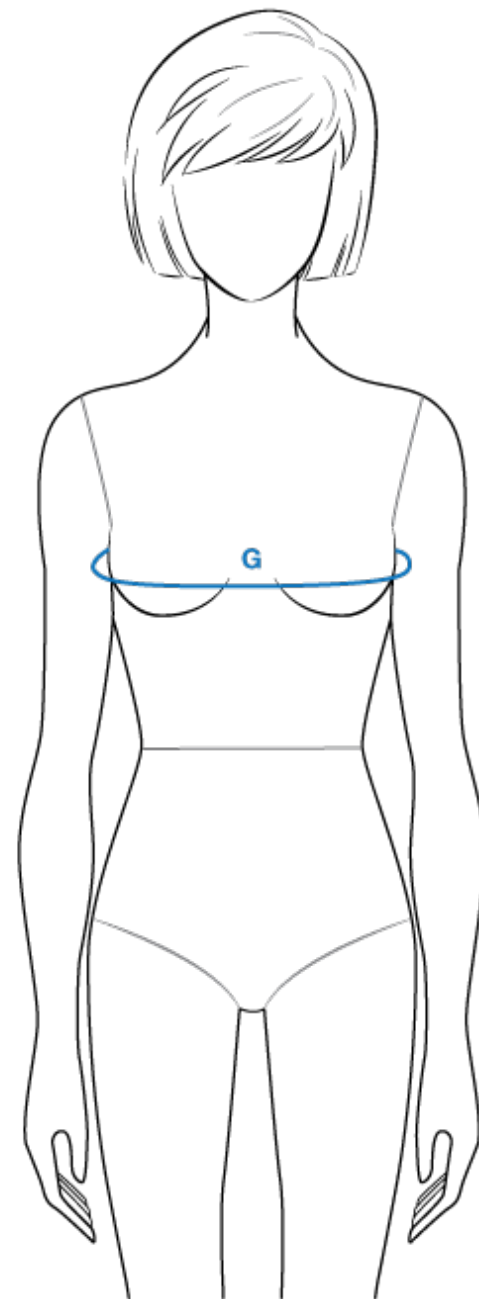

รอบอก วัดรอบอกผ่านจุดหัวอก

จุดวัดตำแหน่ง

H

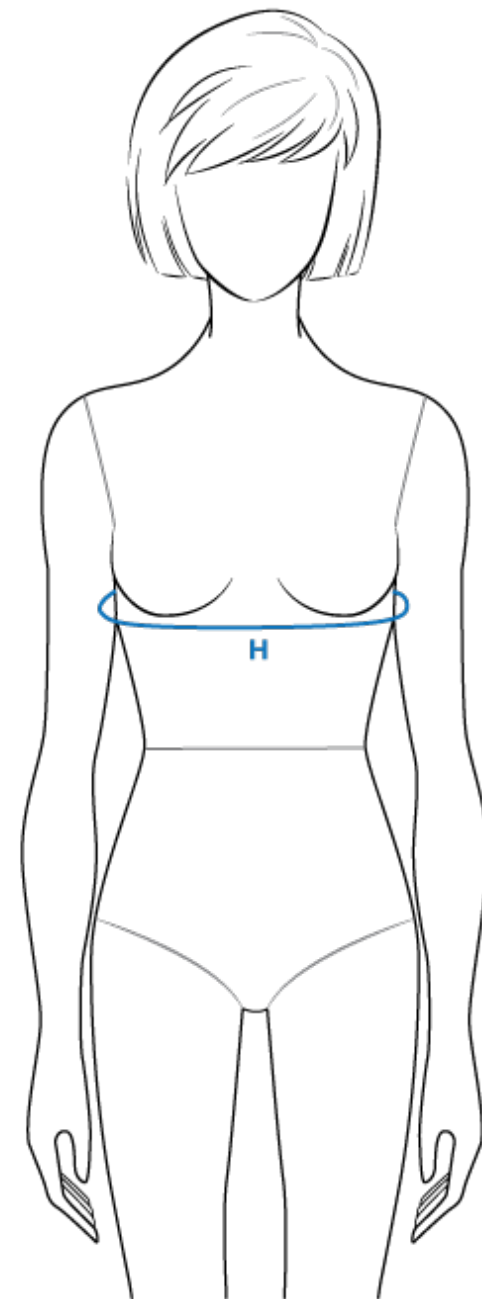


รอบใต้ออก วัดโดยรอบฐานใต้ออก

จุดวัดตำแหน่ง



เอว

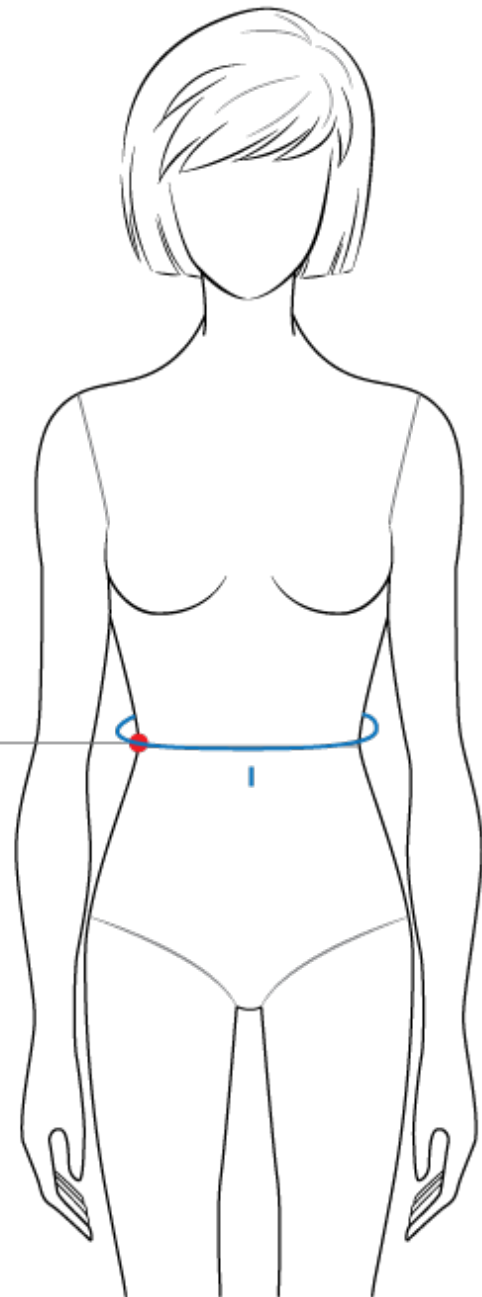

รอบเอว วัดรอบเอวตำแหน่งเดียวกับที่ผูกเชือกไว้

จุดวัดตำแหน่ง

J



10 ซม.

สะโพกบน

เอว

10 ซม.

J

สะโพกบน ระยะวัดจากเอวลงมา 10 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

จุดวัดตำแหน่ง

K



20 ซม.

สะโพกล่าง

เอว

20 ซม.

K



สะโพกล่าง ระยะห่างลงมาจากเอว 20 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

จุดวัดตำแหน่ง

L




รอบวงแขน วัดความยาวรอบรักแร้

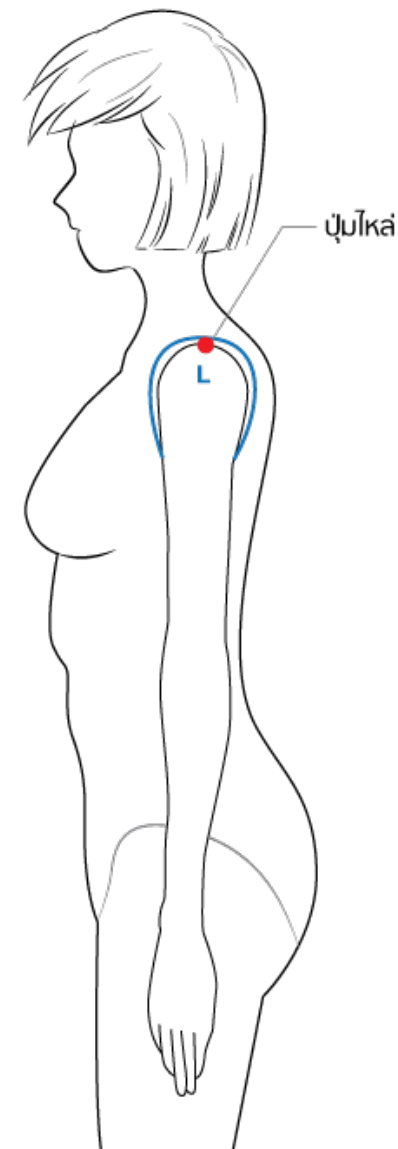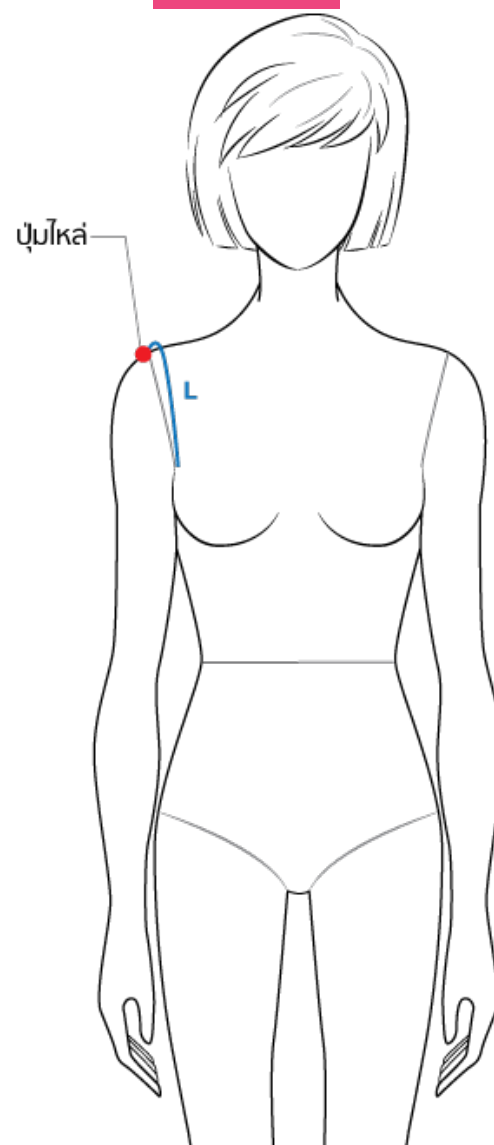

จุดวัดตำแหน่ง


M

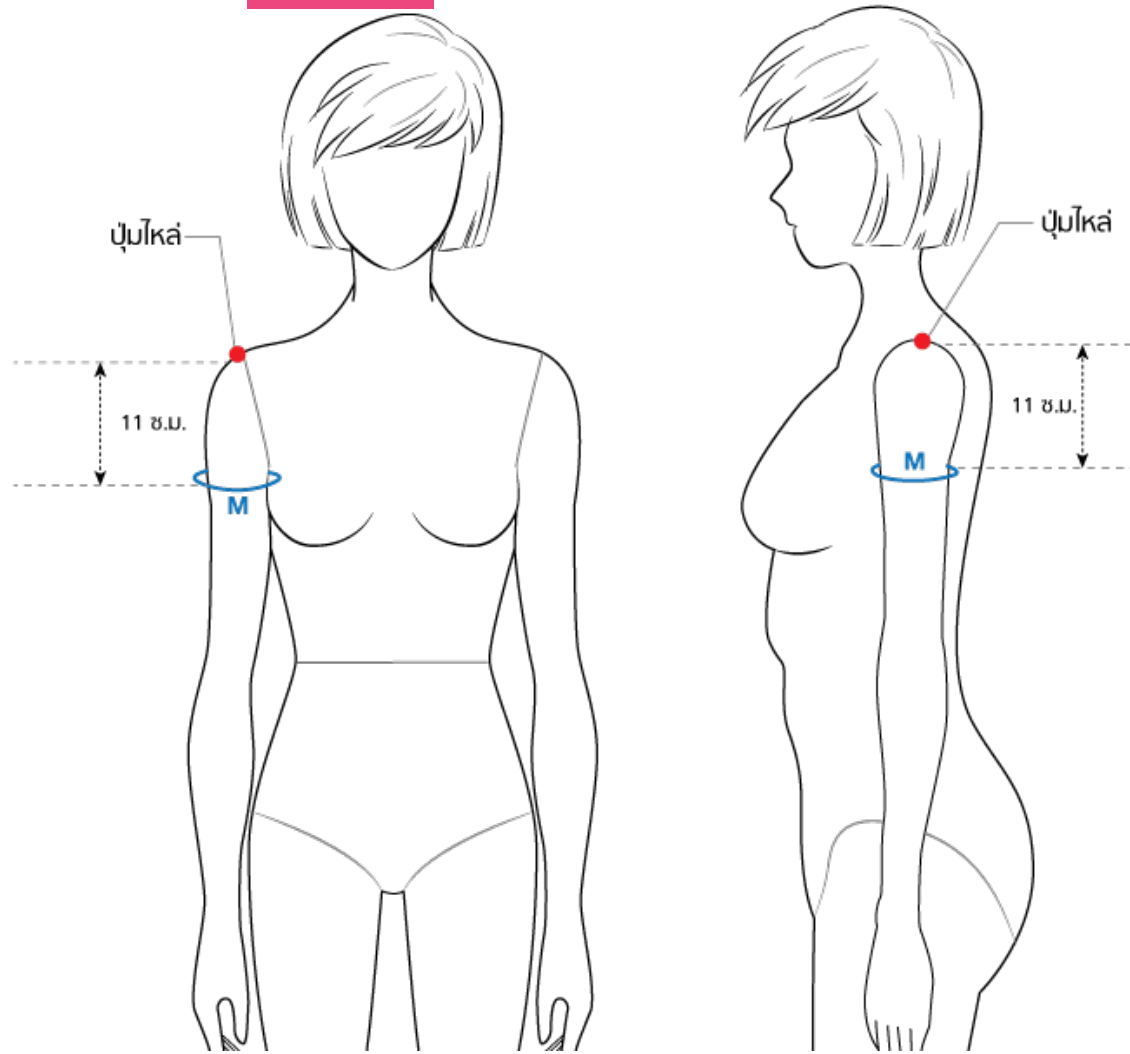

รอบต้นแขนส่วนที่ 1 โดยวัดห่างลงมาจากปุ่มไหล่ 11 ซม. แล้ววัดโดยรอบ




จุดวัดตำแหน่ง

N

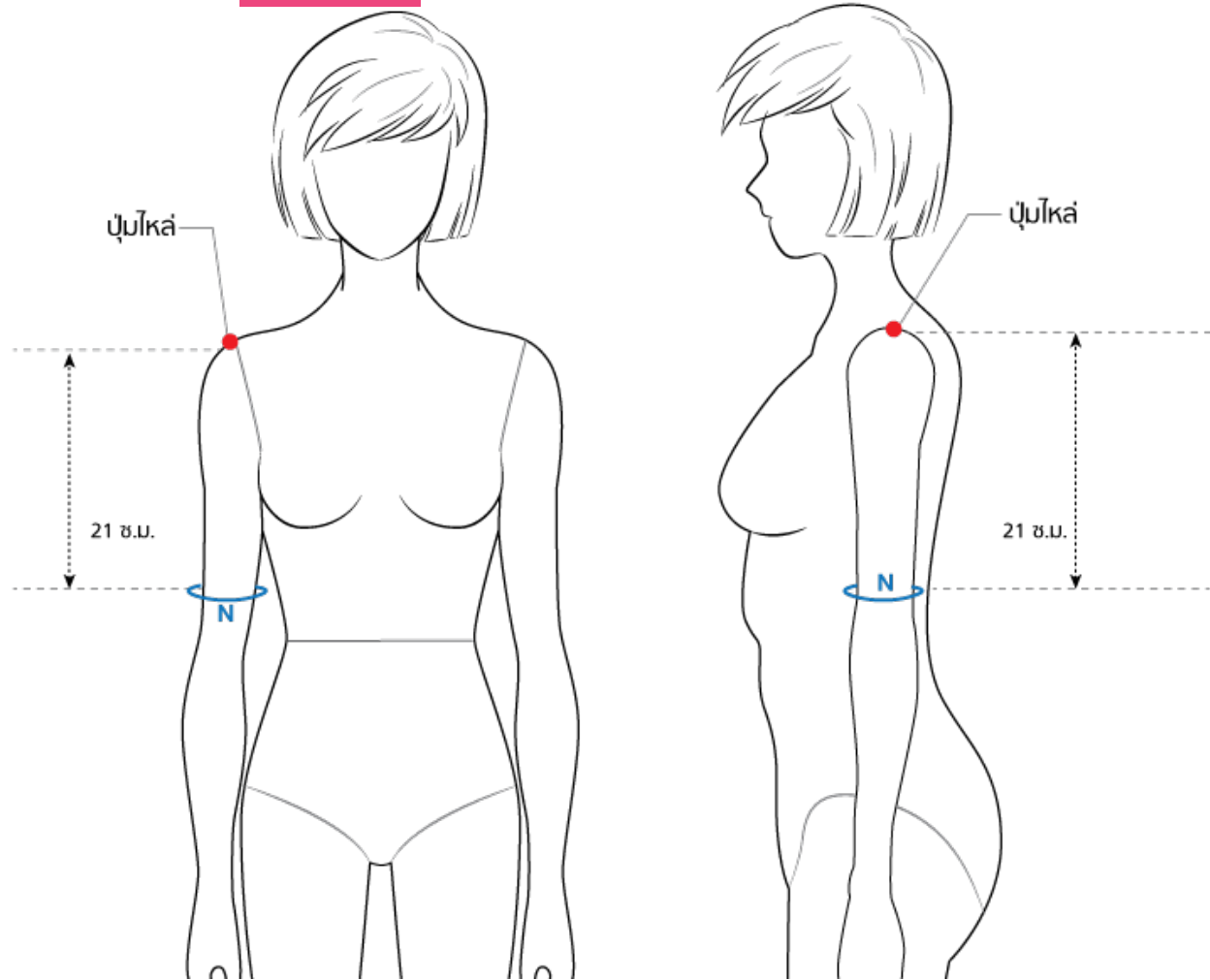

รอบต้นแขนส่วนที่ 2 โดยวัดห่างลงมาจากปุ่มไหล่ 21 ซม. แล้ววัดโดยรอบ


จุดวัดตำแหน่ง

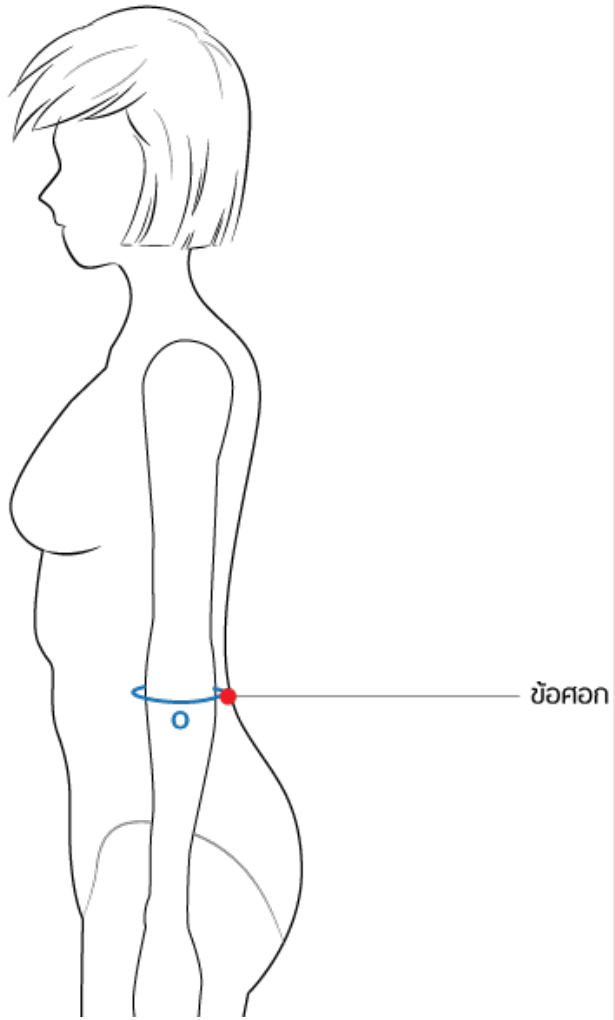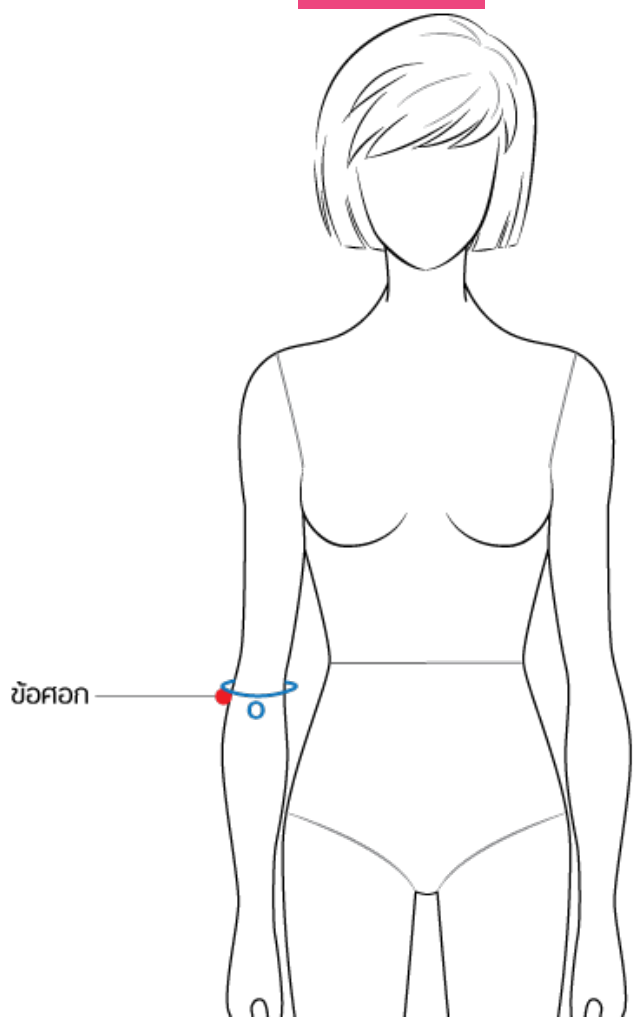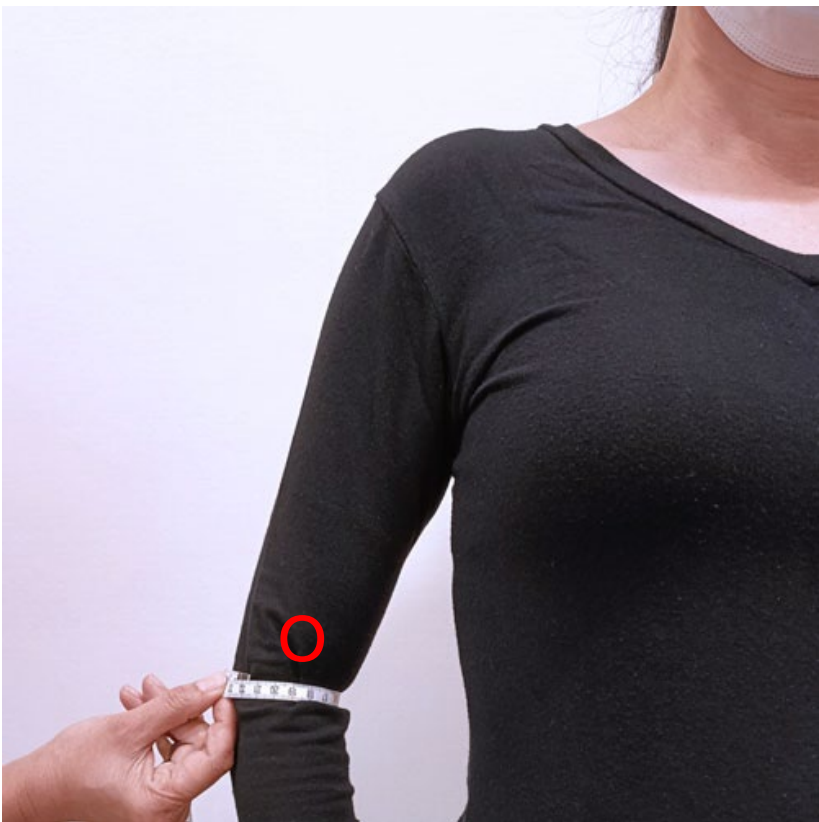

ข้อศอก วัดรอบแขนบริเวณข้อศอก

จุดวัดตำแหน่ง


P

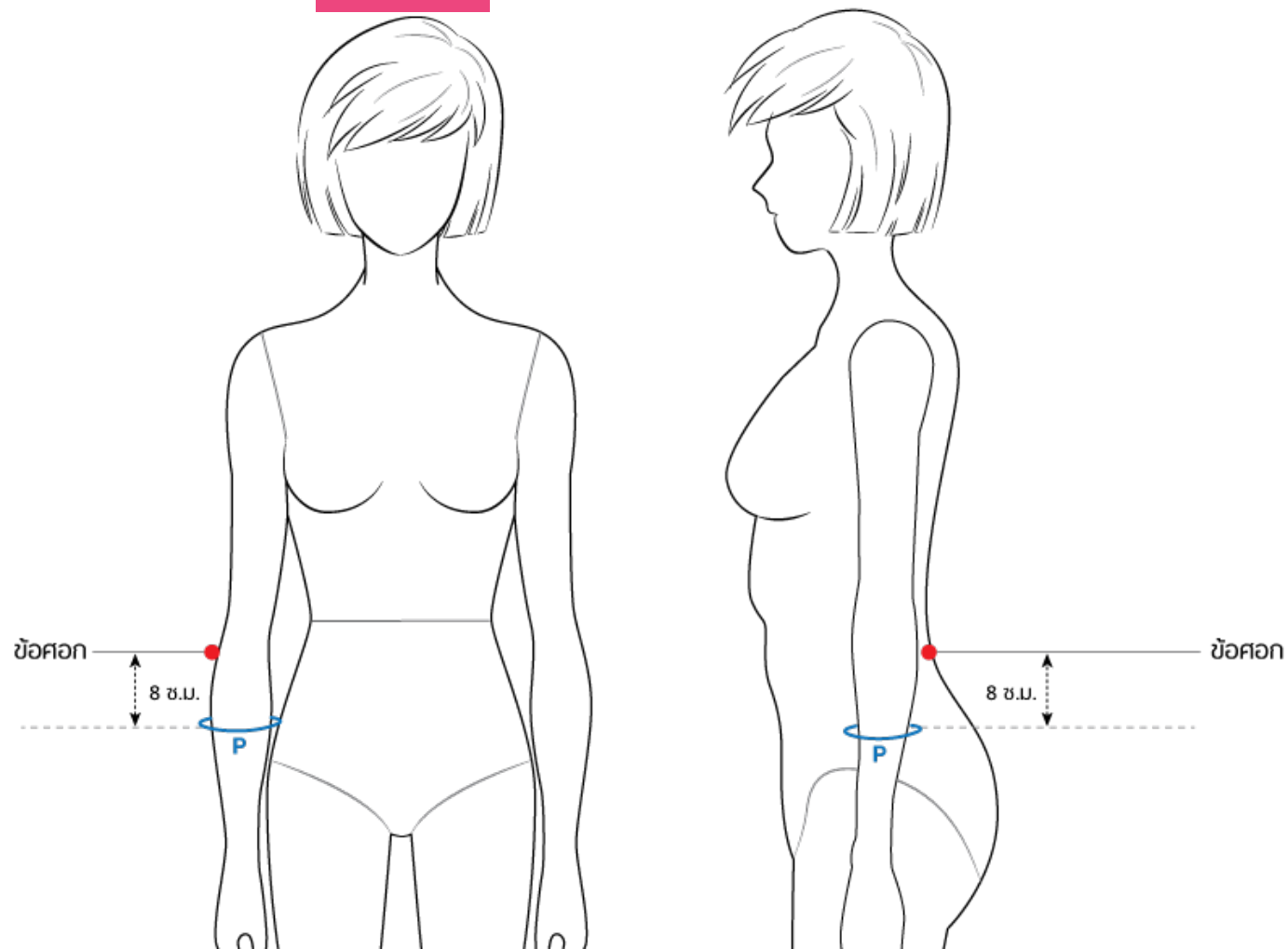

รอบแขนล่างส่วนที่ 1 ระยะห่างจากข้อศอก 8 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

จุดวัดตำแหน่ง



Q

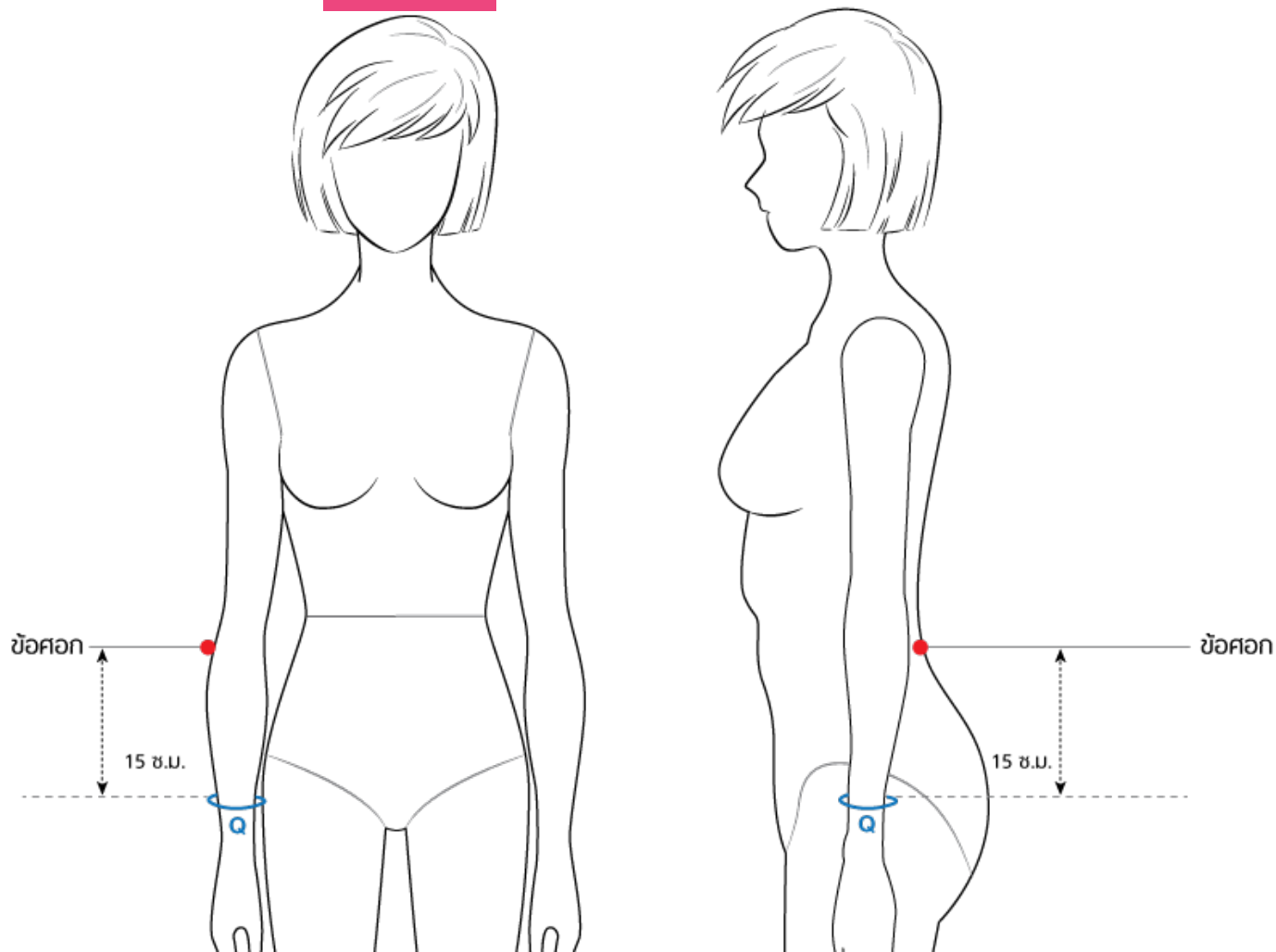

รอบแขนล่างส่วนที่ 1 ระยะห่างจากข้อศอก 15 ซม. แล้ววัดโดยรอบ

จุดวัดตำแหน่ง

R

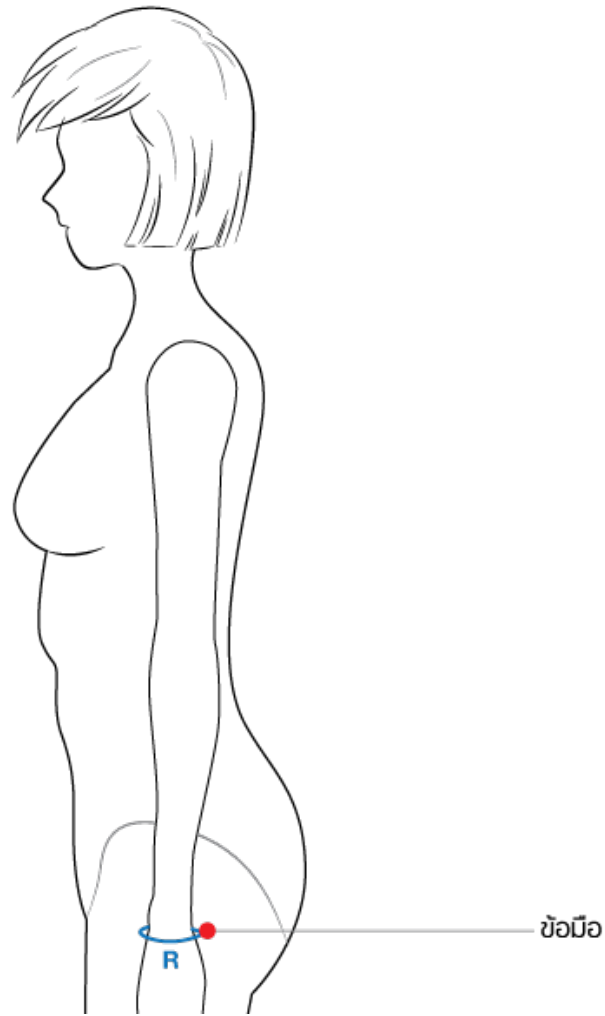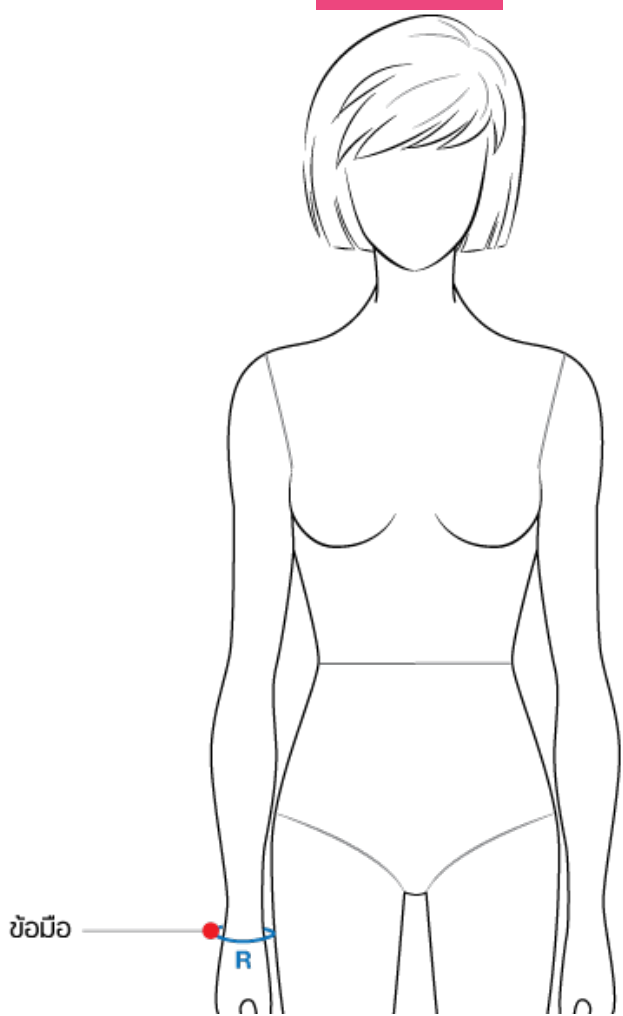



ข้อมือ วัดรอบข้อมือ

จุดวัดตำแหน่ง **S,T**

ปุ่มไหล่

ข้อพับศอก

ข้อมือ

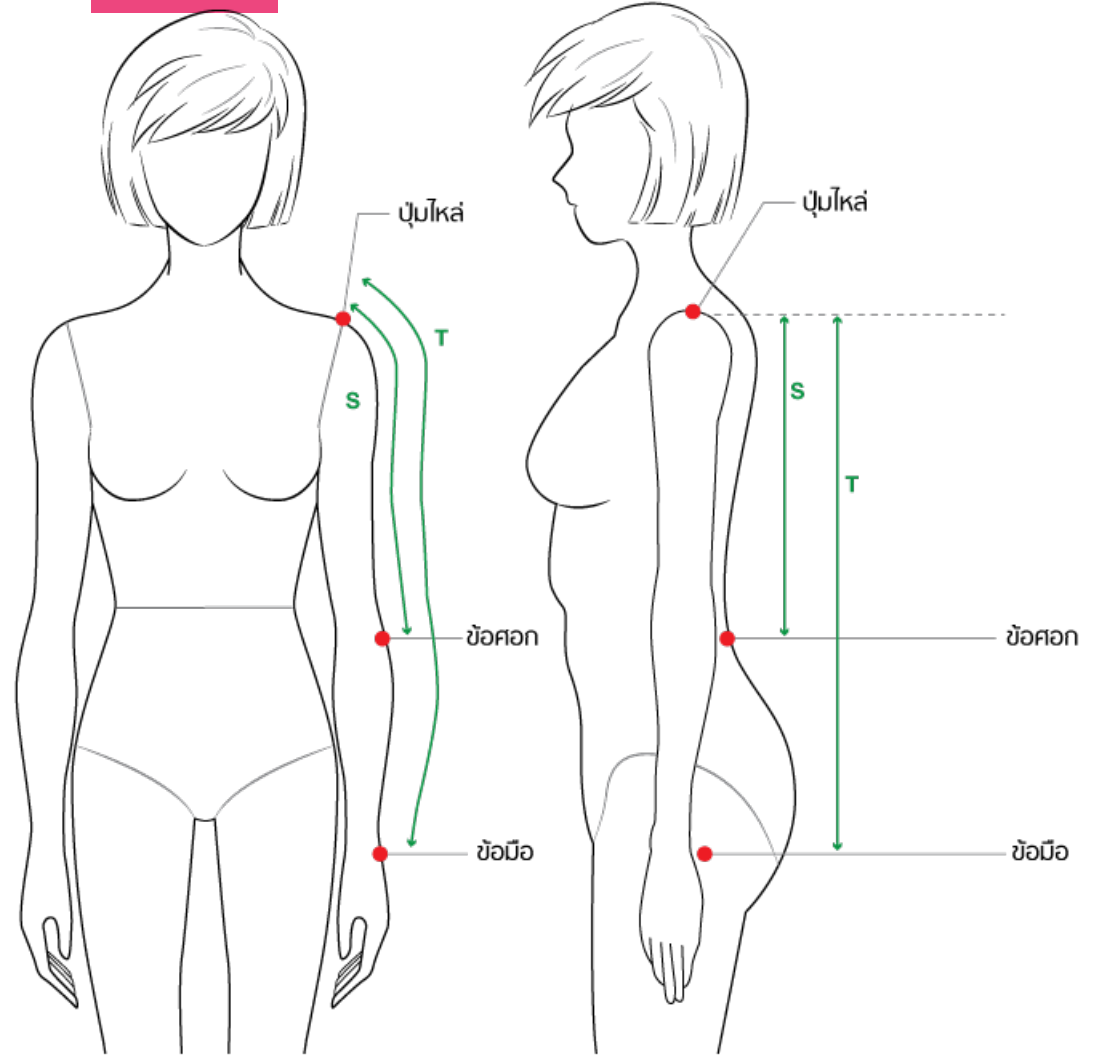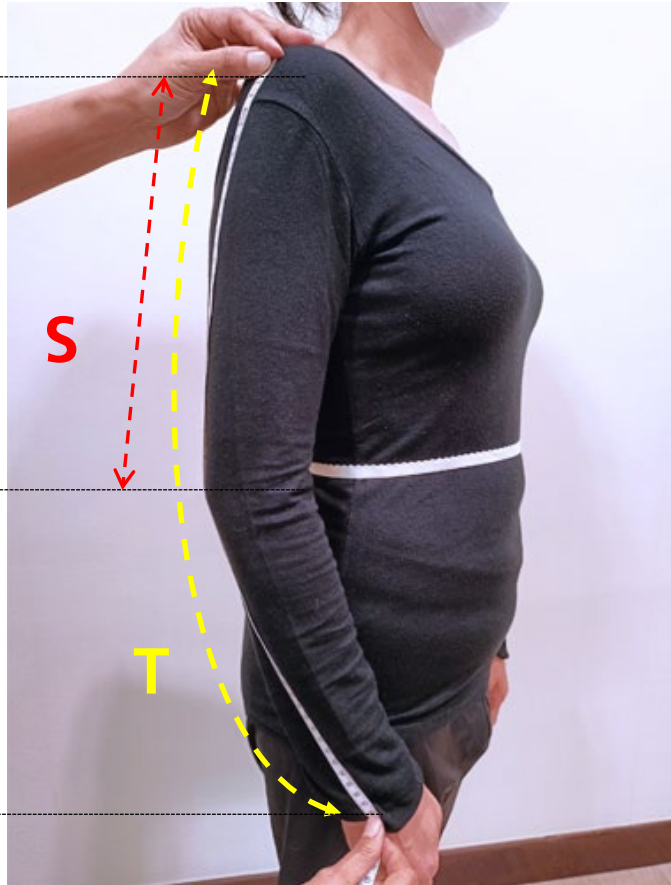


ยึดสายวัดไว้ที่ตำแหน่งปุ่มไหล่จรดข้อมือ แล้วอ่านค่าตัวเลขที่ตำแหน่งข้อศอกและข้อมือ

จุดวัดตำแหน่ง

U



เอว

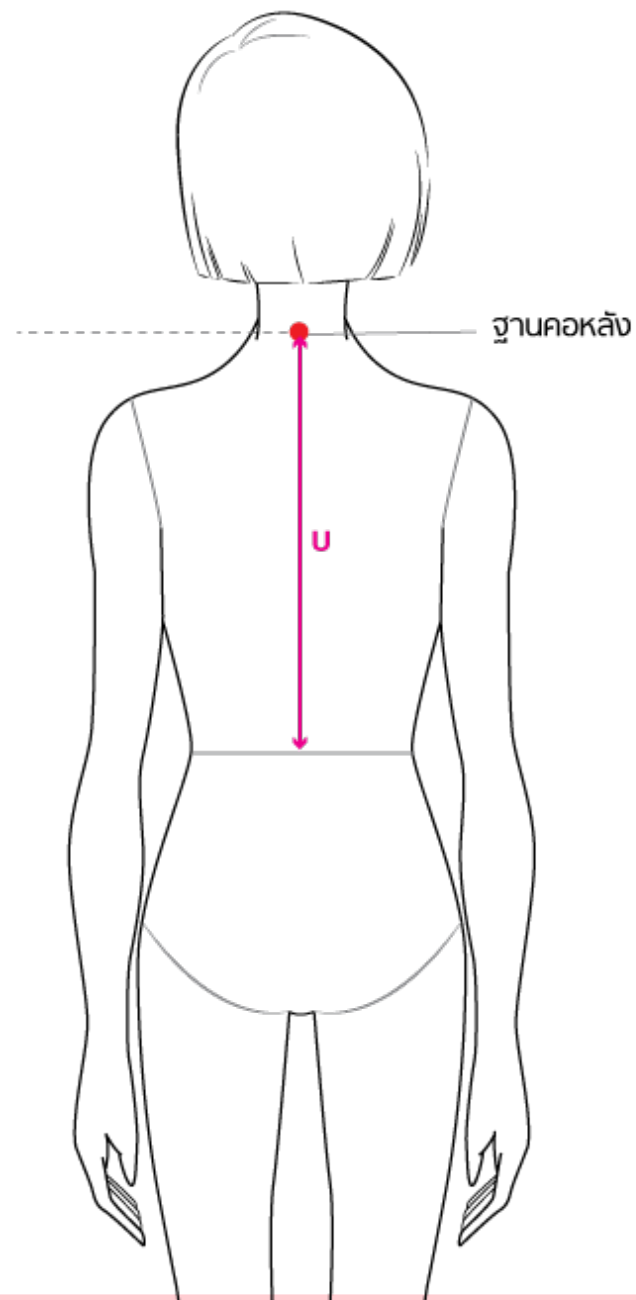


ฐานคอหลัง

U

ยาวหลัง วัดจากฐานคอหลัง ถึงเอว

จุดวัดตำแหน่ง



V

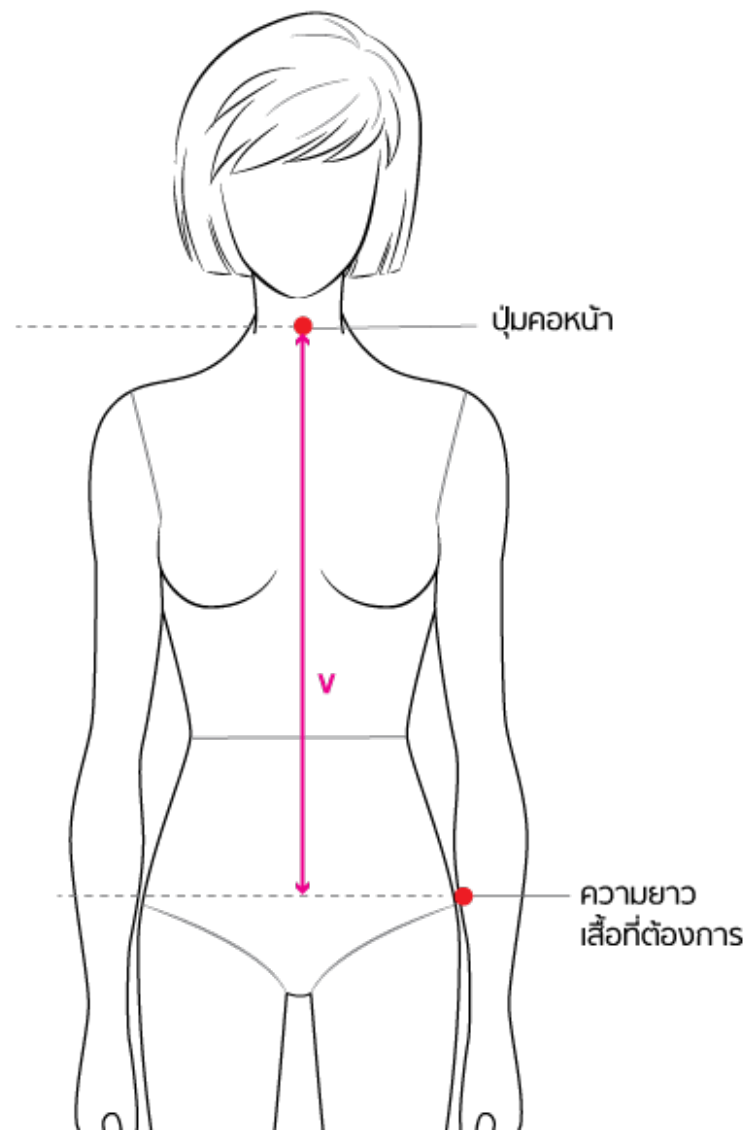

ความยาวเสื้อ วัดจากปุ่มคอหน้า ถึงความยาวเสื้อที่ต้องการ

จุดวัดตำแหน่ง

W

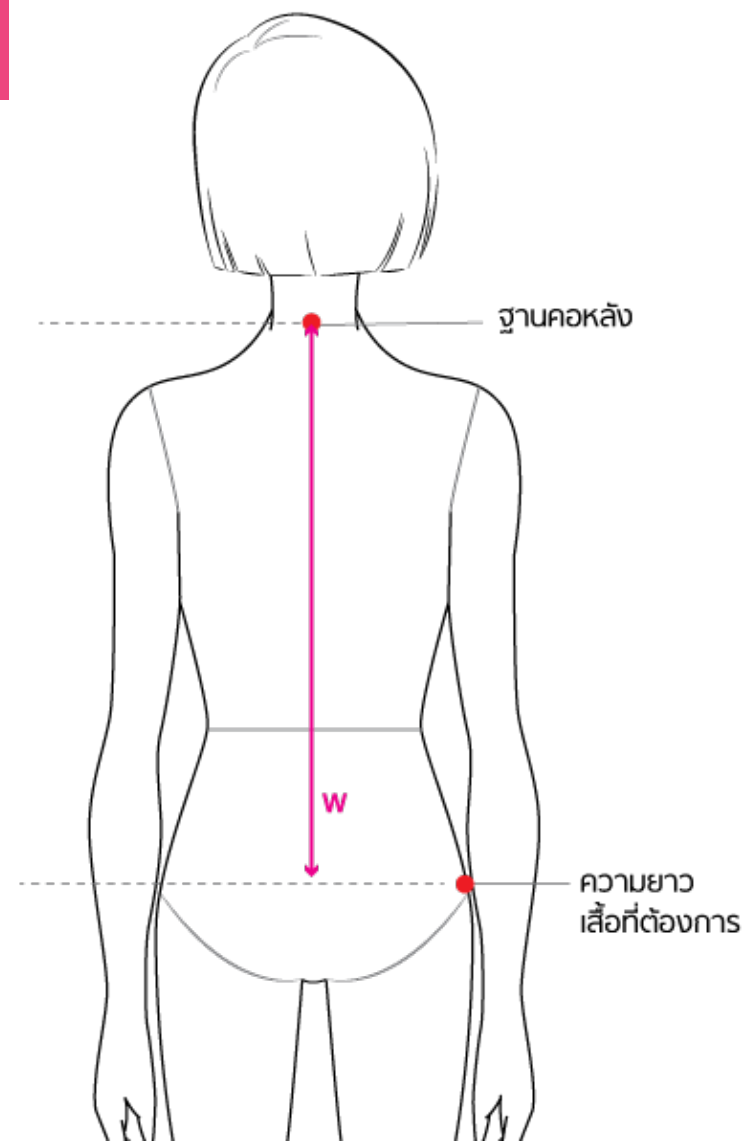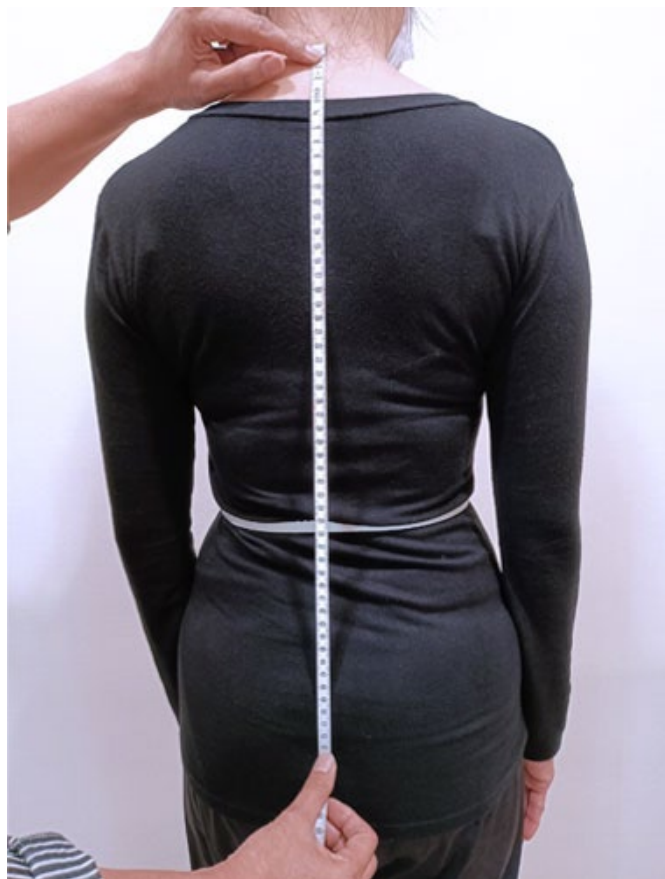

ความยาวเสื้อ วัดจากฐานคอหลังให้ตำแหน่งตรงกับความยาวเสื้อด้านหน้า